



INTEGRAL

INTEGRAL® II

- **PRATICO**

Conta garze elettronico

Integral® II consente di monitorare costantemente il conteggio delle garze utilizzate durante l'operazione chirurgica.

- **SICURO**

Le garze sono dotate di un micro tag che permette a Integral® II di effettuare il conteggio.

- **PRECISO**

Integral® II si avvale di un sofisticato abbinamento di hardware e software per contare le garze utilizzate.

- **VELOCE**

Il display touch screen permette in pochi passaggi di inserire i dati del paziente e dell'operazione .



INTEGRAL® II

CONTA GARZE ELETTRONICO INTEGRAL II

Integral® II è un sistema elettronico per il conteggio delle garze sterili utilizzate durante un intervento chirurgico.

Questo sistema consente all'operatore di monitorare costantemente il conteggio delle garze utilizzate durante l'operazione chirurgica. Attraverso il suo display Touch Screen è possibile inserire tutti i dati inerenti all'intervento e caricare in pochi passaggi il numero e il formato delle garze che verranno utilizzate.

Il display è molto facile da pulire ed è utilizzabile anche con i guanti.

Integral® II si avvale di un sofisticato abbinamento di hardware e software per contare le garze, qualunque altro oggetto gettato nel sistema non verrà conteggiato.

Le garze (brevettate) sono dotate di un micro tag al loro interno che permette a Integral® II di effettuare il conteggio senza margine di errore.

INTEGRAL® II



Alla fine dell'intervento il sistema vi avvisa in maniera sonora e visiva se tutte le garze sono state conteggiate e quindi sono al suo interno, oppure ne manca una o più. In questo caso un'antenna manuale esterna vi permetterà di cercarla, anche se, nel peggiore delle ipotesi, fosse rimasta all'interno del paziente.

Dotato di stampante Integral® II produce il resoconto dell'intervento da allegare alla cartella clinica. Inoltre, tramite un semplice cavo USB tutti i dati possono essere scaricati su un computer esterno.

La divisione in due scomparti di Integral® II permette di avere un vano tecnico separato dal vano contenente il sacco con le garze usate durante l'intervento. Il vano tecnico è accessibile mediante serratura solo agli operatori autorizzati, mentre il vano di servizio può essere aperto e pulito durante la normale operatività di sala.

Il suo grande display Touch Screen vi permetterà di gestire tutte le informazioni dell'intervento. E' utilizzabile con i guanti e facile da pulire.

Le sue dimensioni compatte e la dotazione di ruote permette di spostare Integral® Il ovunque e senza ingombro.



Integral® II conterà solo le garze, dotate di micro-tag, infilate nell'apposito vano utilizzate durante l'intervento chirurgico. Qualunque altro oggetto gettato nel sistema non verrà conteggiato.

Qualora mancasse una o più garze all'appello, un'apposita antenna manuale esterna, vi permetterà di individuare dove si trova, anche se fosse rimasta all'interno del paziente.



INTEGRAL® II

SPECIFICHE TECNICHE

- **Modello:** Integral® II
- **Dimensioni:** h148cmx50cmx60cm
- **Software:** Windows
- **Garanzia:** 2 anni

IDEATO E PRODOTTO IN ITALIA DA:



INFINISURGE

Via Villalta, 57-61
33100 Udine – Italy
Tel. +39 (0)432 50 11 07
info@infinisurge.eu
www.infinisurge.eu